


КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ВОРОНКИ

Сцеживание грудного молока не должно сопровождаться неприятными ощущениями, а размер воронки для груди в значительной степени влияет на ощущения, которые вы испытываете при использовании молокоотсоса. Воронки для груди Nuvita доступны в 3 размерах: 20, 22 и 24 мм.

1. С помощью линейки или измерительной ленты измерьте диаметр соска (в мм), проходя через центр соска и исключая область ареолы.
2. Подберите подходящий размер воронки, который наиболее близок к полученному в результате измерения значению.

РАЗМЕР СОСКА

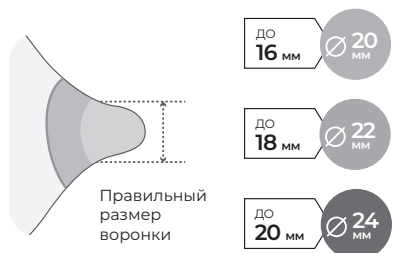

Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	Гарантия 1 год		
	____/____/____ Дата продажи		
	_____ Серийный номер	_____ Печать магазина	

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд»
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd»
1 Ferris building, St.Luke's Street, PTA1020
Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

Поставщик/Импортёр: ООО «Кид Трейд»,
125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.
Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 3 года.

www.nuvita-baby.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ NUVITA

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.
4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
 - механические повреждения корпуса;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);
 - быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны);
 - недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
 - повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
 - повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

nuvitamum

MATERNO SMART WEAR
1287CW



Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель, вы приобрели один из самых современных и надежных молокоотсосов на рынке – молокоотсос MATERNO SMART Wear бренда Nuvita. Мы разработали данное устройство, чтобы оно было максимально удобным в использовании. Пожалуйста, прочтите и сохраните данную инструкцию, чтобы иметь полное представление о всех преимуществах молокоотсоса. Обязательно возьмите с собой в дорогу четыре целочные батарейки типа AA.

ВНИМАНИЕ

- Не оставляйте данное изделие в условиях высокой температуры на длительное время.
- Молокоотсос следует мыть до и после использования.
- Перед началом использования убедитесь, что молокоотсос правильно собран и его части надежно установлены.
- При сборке или разборке изделия, следуйте указаниям, приведенным в разделе «Сборка молокоотсоса».
- Все материалы, используемые в данном изделии, соответствуют национальным стандартам безопасности, наличие небольшого запаха является нормой.
- Если вы хотите использовать электрический молокоотсос на этапе снижения лактации, пожалуйста, используйте его под руководством врача.
- Не используйте молокоотсос слишком долго за одну процедуру сцеживания во избежание травм груди.
- Если вы почувствуете боль во время использования молокоотсоса, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
- Молокоотсос предназначен для личного использования, поэтому не рекомендуется передавать его в пользование другим лицам.
- Используйте данное изделие только по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не используйте молокоотсос в душе или в ванной.
- Не скручивайте и не завязывайте узлом соединительную трубку в процессе использования.
- Хранить в недоступном для детей месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Молокоотсос имеет трехфазную технологию: 1-я фаза с 9 регулируемыми уровнями стимуляции с работой в течение 2 минут. 2-я фаза с 9 регулируемыми уровнями сцеживания на Ваш выбор. 3-я фаза (выбирается при необходимости) для полного извлечения молока из груди для предотвращения лактостаза (застоя молока).
2. Устройство оснащено антирефлюксной системой, которая предотвращает возврат грудного молока в блок управления и повреждение молокоотсоса в процессе сцеживания.
3. Materno Smart Wear работает как от сети, так и от перезаряжаемого аккумулятора, что позволяет использовать его в дороге, на работе или в любом другом месте..

СБОРКА МОЛОКООТСОСА

1. Вставьте воронку "A" в корпус молокоотсоса "D".
2. Установите силиконовую вставку "C" на верхнюю часть корпуса молокоотсоса. Убедитесь, что края силиконовой вставки плотно прилегают к корпусу, а специальная выемка установлена правильно.
3. Закрепите лепестковый клапан "E" в нижней части корпуса молокоотсоса и убедитесь, что он установлен так, как показано на рисунке 3.
4. Прикрепите корпус молокоотсоса к портативной чаше "H" и убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу.
5. Наденьте крышку на портативную чашу и плотно прижмите их друг к другу.
6. Для одинарного подключения подсоедините к блоку управления портативную чашу с помощью соединительной силиконовой трубки.
7. Для двойного подключения подсоедините к блоку управления 2 портативные чаши с помощью 2 соединительных силиконовых трубок.

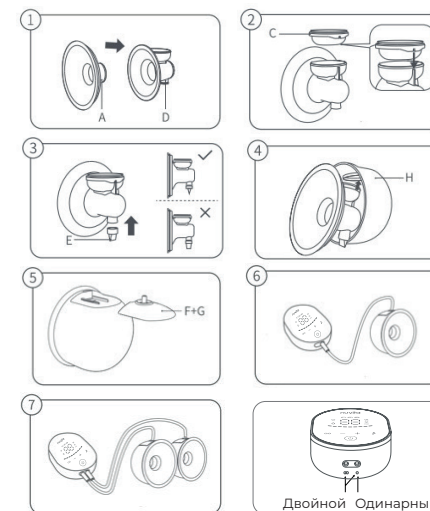

EAC

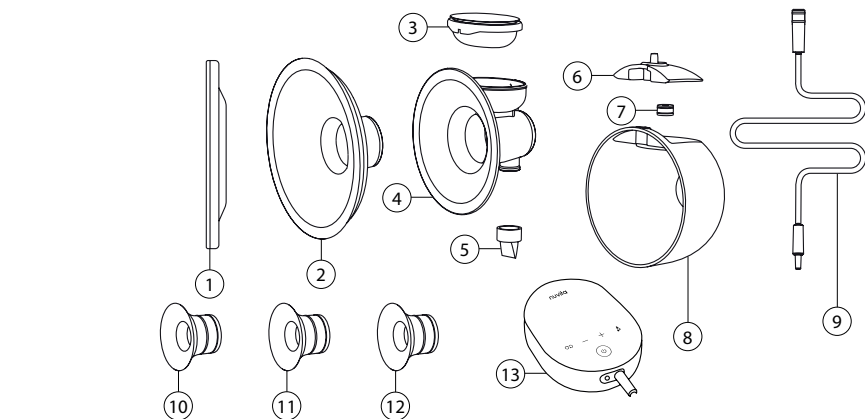

ЭЛЕМЕНТЫ

Модель	1287CW Кол-во
1. Крышка для воронки	1
2. Накладка для груди на воронку	1
3. Силиконовая вставка	1
4. Воронка с молокоотсосом	1
5. Лепестковый клапан	1
6. Крышка	1
7. Кольцо для крышки	1
8. Портативная чаша для молока	1
9. Соединительный кабель	1
10. Силиконовая воронка 20 мм	1
11. Силиконовая воронка 22 мм	1
12. Силиконовая воронка 24 мм	1
13. Блок управления	1
14. Мешочек для хранения (на фото отсутствует)	1

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

A1. Кнопка включения и выключения
A2. Одинарное / Двойное подключение (индикатор ВКЛ – одинарное подключение / индикатор ВЫКЛ – двойное подключение)
A3. Уменьшение интенсивности всасывания
A4. Увеличение интенсивности всасывания
A5. Выбор рабочего режима
B1. Индикатор уровня
B2. Индикатор времени (мин)
B3. Индикатор режима сцеживания
B4. Индикатор режима стимуляции
B5. Индикатор режима дренажа / предотвращение застоя молока
B6. Индикатор одинарного использования
B7. Индикатор минуты
B8. Индикатор заряда батареи

УРОВНИ ЧАСТОТЫ ВСАСЫВАНИЯ:

- 1-9 Режим стимуляции с быстрым и коротким уровнем всасывания.
- 1-9 Режим сцеживания (имитирует сосание ребенка). Уровень всасывания этой фазы более медленный, глубокий и продолжительный.
- 1-9 Режим дренажа для предотвращения застоя молока, помогает предотвратить лактостаз.

НАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Включите устройство кнопкой A1. Экран проверится и перейдет в режим стимуляции (уровень 1 по умолчанию).

1. Включение

- Нажмите кнопку A1 (питание).
- Устройство выполнит самопроверку и автоматически перейдет в режим стимуляции (уровень 1 по умолчанию).

2. Управление интенсивностью

- Кнопка A4 — увеличение интенсивности всасывания.

3. Режимы работы

► Режим стимуляции

- Активируется автоматически при включении.
- Через 2 минуты автоматически переключается в режим сцеживания.

► Режим сцеживания

- Активация: нажмите A5 (можно до истечения 2 минут стимуляции, если началось активное выделение молока).
- Для возврата в режим стимуляции: повторно нажмите A5 (сохраняется предыдущий уровень интенсивности).
- Автоотключение через 30 минут.

► Режим дренажа

- Активация: нажмите A5 в любой момент.
- Регулировка интенсивности: кнопка A4.
- Автоотключение через 5 минут.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Всегда мойте руки перед использованием. Убедитесь, что детали молокоотсоса промыты и собраны точно в соответствии с инструкцией.
- Направьте центр собранной чаши молокоотсоса на сосок и держите его близко к груди, а другой рукой придерживайте грудь, чтобы не допустить попадания воздуха.
- Отрегулируйте бюстгальтер для кормления так, чтобы вам было удобно, закрепите чашу на груди и займите удобное вертикальное положение. Убедившись в правильном подключении молокоотсоса к блоку управления, начинайте процесс сцеживания.
- Если диаметр соска не соответствует диаметру воронки, используйте дополнительную силиконовую воронку. Вставьте силиконовую воронку нужного размера в воронку и убедитесь, что она вплотную прилегает к ней (рис.4).
- После завершения сцеживания аккуратно снимите корпус молокоотсоса, снимите крышку с чаши и перелейте молоко в бутылочку для хранения молока или пакет для хранения молока. (Примечание: не превышайте максимальный объем 180 мл).
- Разберите и промойте молокоотсос. Силиконовую трубку, воронку, чашу для сбора молока, силиконовую вставку, лепестковый клапан и другие принадлежности можно поместить в стерилизатор для дезинфекции (за исключением силиконовой трубки в сборе и чаши в сборе). Проведите стерилизацию неэлектронных деталей для следующего использования.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

ВАЖНО: отключите устройство перед подключением к адаптеру.

- Вставьте круглый штекер в гнездо на блоке управления, а другой конец адаптера в розетку, как показано на схеме.
- При низком заряде батареи иконка будет мигать, указывая на то, что необходимо зарядить батарею
- Во время зарядки все 3 иконки будут мигать.
- Когда устройство будет полностью заряжено, останется гореть только иконка с 3 делениями

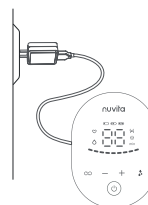

ОЧИСТКА

- После каждого использования очищайте детали, пригодные для чистки.
- Не используйте для чистки ершики со стальной проволокой, острые инструменты или агрессивные чистящие средства.
- Для чистки рекомендуется использовать мягкую губку или щетку и нейтральное моющее средство.
- Силиконовую трубку, накладку на воронку, чашу для молока и силиконовуюставку можно поместить в стерилизатор для дезинфекции (За исключением силиконовой трубки в сборе и чаши в сборе).
- Силиконовая вставка и лепестковый клапан изготовлены из силикона. Не рекомендуется стерилизовать их при высокой температуре в течение длительного времени, чтобы не спровоцировать износ или деформацию.
- Не погружайте соединительную трубку в сборе и чашу в сборе в воду для очистки, это может привести к необратимому повреждению изделия. Протирайте их чистой влажной тканью.
- При разборке и чистке не потеряйте мелкие детали.
- При чистке будьте осторожны с лепестковым клапаном, силиконовой вставкой и другими деталями. Если они повредятся, это повлияет на работу молокоотсоса.
- Данное изделие нельзя нагревать и дезинфицировать в микроволновой печи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы постарались тщательно продумать каждую деталь, комплектацию изделия и прилагаемую документацию для Вашего удобства. Поэтому в случае возникновения проблем при использовании молокоотсоса рекомендуем еще раз повторить все операции, точно следуя инструкциям в руководстве. Для получения дополнительной информации о товаре зайдите на сайт www.nuvita-baby.ru.

