

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проверьте молокоотсос перед каждым использованием.
- Прекратите использование при любых признаках повреждений или износа.
- Если вы испытываете боль или дискомфорт, проконсультируйтесь с врачом.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Промывайте воронки чистой холодной водой.
- Используйте средство для мытья детской посуды или жидкое мыло.
- Ополосните холодной водой.
- Протрите чистым сухим полотенцем или дайте деталям высохнуть, разложив их на сухом полотенце.
- Храните в специальном мешочке, пакете или коробке.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Тщательно мойте руки с мылом перед использованием.
- Помойте или протрите грудь влажным полотенцем.
- Не используйте щелочное мыло и спирт, они сушат кожу и могут вызвать появление трещин на сосках

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы постарались тщательно продумать каждую деталь, комплектацию изделия и прилагаемую документацию для Вашего удобства. Поэтому в случае возникновения проблем при использовании молокоотсоса рекомендуем еще раз повторить все операции, точно следуя инструкциям в руководстве. Для получения дополнительной информации о товаре зайдите на сайт www.nuvita-baby.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ NUVITA

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанному в талоне.
4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
 - механические повреждения корпуса;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);
 - быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны);
 - недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
 - повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
 - повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.

nuvitababy

MATERNO SMART X



1287CX



1287KDX

Дополнительный набор для трансформации Materno Smart X в двойной молокоотсос (продается отдельно)

1287CX
1287KDX

Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель, вы приобрели один из самых современных и надежных молокоотсосов на рынке – молокоотсос MATERNO SMART X бренда Nuvita. Мы разработали данное устройство, чтобы оно было максимально удобным в использовании. Пожалуйста, прочтите и сохраните данную инструкцию, чтобы иметь полное представление о всех преимуществах молокоотсоса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед началом использования.
- Данный продукт предназначен только для взрослых.
- Используйте только оригинальный адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Не скручивайте и не завязывайте узлом соединительную трубку (№ 10 на схеме) в процессе использования.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Ни в коем случае не вскрывайте блок управления молокоотсосом (№ 9 на схеме) самостоятельно; это должен делать только производитель или специалист.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед использованием проверьте комплектацию. Если вы обнаружили, что не хватает одной или нескольких деталей или имеются повреждения, обратитесь к продавцу:

1287CX MATERNO SMART X

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Накладка на воронку | 9. Блок управления |
| 2. Дополнительная воронка | 10. Силиконовая трубка |
| 3. База молокоотсоса с воронкой | 11. Крышка для бутылочки |
| 4. Силиконовая вставка | 12. Сменная соска |
| 5. Крышка | 13. Кольцо для соски |
| 6. Лепестковый клапан | 14. Адаптер питания |
| 7. Бутылочка 150 мл | 15. Мешочек для хранения (на фото отсутствует) |
| 8. Силиконовый клапан | |

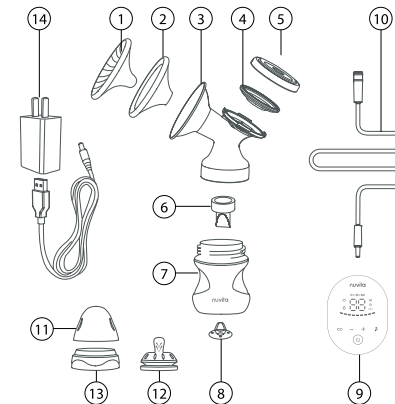

1287KDX

1. Накладка на воронку
2. Дополнительная воронка
3. База молокоотсоса с воронкой
4. Силиконовая вставка
5. Крышка
6. Лепестковый клапан
7. Бутылочка 150 мл

ОЧИСТКА

- Перед очисткой и стерилизацией отсоедините детали, контактирующие с грудью или грудным молоком (кроме блока управления (№ 9 на схеме)).
- Не мойте блок управления молокоотсосом (№ 9 на схеме) в воде.
- Не стерилизуйте блок управления молокоотсосом (№ 9 на схеме) в паровом стерилизаторе.
- Не проводите тепловую стерилизацию силиконовой трубки (№ 10 на схеме). Рекомендуется только холодная стерилизация. В противном случае очистите теплой водой с мылом, а затем промойте чистой водой.
- Все детали нужно промывать сразу после каждого использования, чтобы избежать попадания остатков молока и размножения бактерий.
- Положите чистые детали на сухое полотенце в прохладное место.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	Гарантия 1 год		
	_____/_____/_____ Дата продажи		
	_____ Серийный номер	_____ Печать магазина	

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд»
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroupp.ru
Режим работы:
пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd»
1 Ferris building, St.Luke's Street, PTAl020 Guardamangia,
Мальта, GLN 5358010000219
Сделано в Китае.

Поставщик/Импортер: ООО «Кид Трейд», 125080,
г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.
Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 3 года.

www.nuvita-baby.ru

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Прибор не является медицинским изделием.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

EAC


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перед Вами электрические молокоотсосы Materno Smart X для максимального увеличения сбора грудного молока. Они имитируют поведение младенца при сосании.

1. Молокоотсос имеет трехфазную технологию: 1-я фаза с 9 регулируемыми уровнями стимуляции с работой в течение 2 минут. 2-я фаза с 9 регулируемыми уровнями сцеживания на Ваш выбор. 3-я фаза (выбирается при необходимости) для полного извлечения молока из груди для предотвращения лактостаза (застоя молока).
2. Устройство оснащено антирефлюксной системой, которая предотвращает возврат грудного молока в блок управления и повреждение молокоотсоса в процессе сцеживания.
3. Materno Smart X работает от сети и имеет перезаряжаемую батарею, поэтому его можно взять с собой в поездку и использовать на работе.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- A1. Кнопка включения и выключения
- A2. Одинарное / Двойное подключение (индикатор ВКЛ – одинарное подключение / индикатор ВыКЛ – двойное подключение)
- A3. Уменьшение интенсивности всасывания
- A4. Увеличение интенсивности всасывания
- A5. Выбор рабочего режима
- B1. Индикатор уровня
- B2. Индикатор времени (мин)
- B3. Индикатор режима сцеживания
- B4. Индикатор режима стимуляции
- B5. Индикатор режима дренажа / предотвращение застоя молока
- B6. Индикатор одинарного использования
- B7. Индикатор минуты
- B8. Индикатор заряда батареи

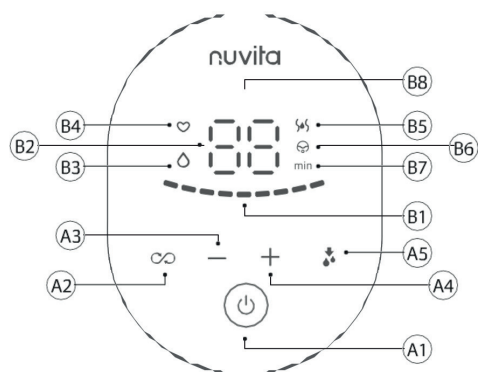


УРОВНИ ЧАСТОТЫ ВСАСЫВАНИЯ:

- 1-9 Режим стимуляции с быстрым и коротким уровнем всасывания.
- 1-9 Режим сцеживания (имитирует сосание ребенка). Уровень всасывания этой фазы более медленный, глубокий и продолжительный.
- 1-9 Режим дренажа для предотвращения застоя молока, помогает предотвратить лактостаз.

СБОРКА МОЛОКООТСОСА

1. Вставьте дополнительную воронку (№ 2 на схеме) в молокоотсос как показано на рисунке 1.
2. Установите силиконовую вставку (№ 4 на схеме) и защитную крышку (№ 5 на схеме) как показано на рисунке 2 и плотно закройте крышку.
3. Установите лепестковый клапан (№ 6 на схеме) как показано на рисунке 3.
4. Плотно прикрутите бутылочку к корпусу молокоотсоса.
5. Вставьте один конец силиконовой трубки (№ 10 на схеме) в гнездо на верхней крышке, а другой - в разъем блока управления (как показано на рисунке 6 для одинарного или двойного подключения).

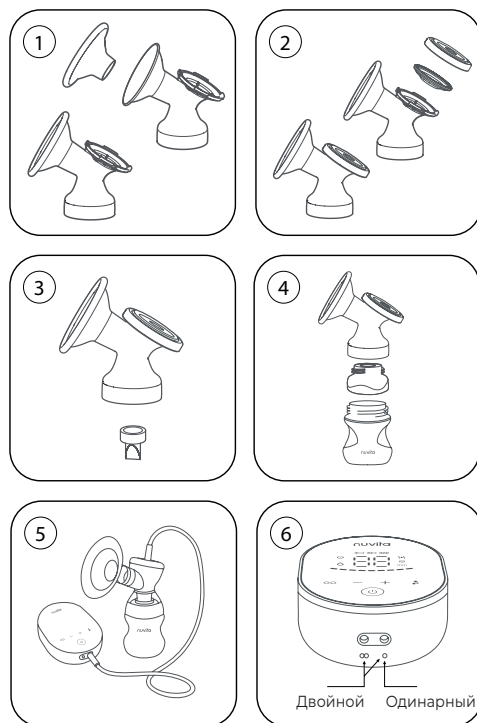

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включите устройство кнопкой A1. Экран проверится и перейдет в режим стимуляции (уровень 1 по умолчанию).

1. Включение
 - Нажмите кнопку A1 (питание).
 - Устройство выполнит самопроверку и автоматически перейдет в режим стимуляции (уровень 1 по умолчанию).
2. Управление интенсивностью
 - Кнопка A4 — увеличение интенсивности всасывания.
3. Режимы работы

Режим стимуляции


- Активируется автоматически при включении.
- Через 2 минуты автоматически переключается в режим сцеживания.

Режим сцеживания

- Активация: нажмите A5 (можно до истечения 2 минут стимуляции, если началось активное выделение молока).
- Для возврата в режим стимуляции: повторно нажмите A5 (сохраняется предыдущий уровень интенсивности).
- Автоотключение через 30 минут.

Режим дренажа


- Активация: нажмите A5 в любой момент.
- Регулировка интенсивности: кнопка A4.
- Автоотключение через 5 минут. Разберите молокоотсос, промойте и простерилизуйте все неэлектронные детали.

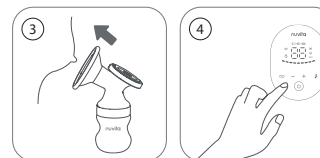

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

ВАЖНО: отключите устройство перед подключением к адаптеру.


1. Вставьте круглый штекер в гнездо на блоке управления, а другой конец адаптера в розетку, как показано на схеме.
2. При низком заряде батареи иконка будет мигать, указывая на то, что необходимо зарядить батарею.
3. Во время зарядки все 3 иконки будут мигать.
4. Когда устройство будет полностью заряжено, останется гореть только иконка с 3 делениями.

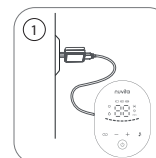

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ВОРОНКИ

Сцеживание грудного молока не должно сопровождаться неприятными ощущениями, а размер воронки для груди в значительной степени влияет на ощущения, которые вы испытываете при использовании молокоотсоса. Воронки для груди Nuvita совместимы со всеми моделями молокоотсосов линейки Materno Smart X и доступны в 3 размерах: 20, 24 и 28 мм.

1. С помощью линейки или измерительной ленты измерьте диаметр соска (в мм), проходя через центр соска и исключая область ареолы.
2. Подберите подходящий размер воронки, который наиболее близок к полученному в результате измерения значению.

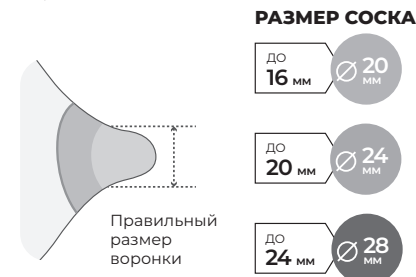

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫБРАН ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОРОНКИ

- Размер выбран правильно**
Если сосок остается в центре воронки, свободно движется во время сцеживания и вы не испытываете никакого дискомфорта, значит воронка подобрана правильно.
- Слишком маленькая**
Если сосок трется о стенку узкой части воронки, краснеет и вы чувствуете дискомфорт, значит воронка мала.
- Слишком большая**
Если сосок и ареола втягиваются глубоко внутрь воронки и становятся беловатыми, значит воронка велика.

ОЧИСТКА

- Все детали нужно промывать сразу после каждого использования, чтобы избежать попадания остатков молока и размножения бактерий.
- Используйте только чистую воду для чистки молокоотсоса.
- Если вы используете щетку или ершик, будьте осторожны, чтобы не повредить детали.
- Промывайте воронки в горячей воде в течение 2 минут.
- Рекомендуются холодная стерилизация.